


SHERMAN

涉漫

ORO系列男性激能延时训练仪

TH-001 说明书

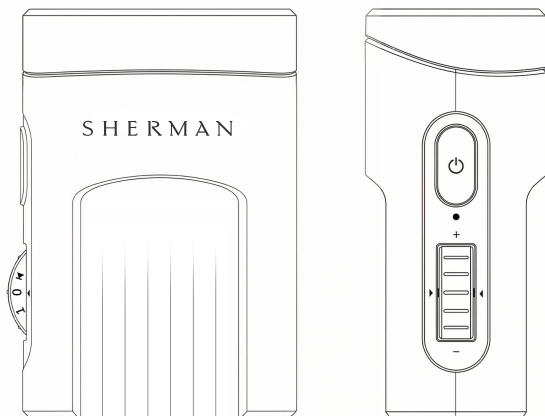

*本产品为家用个人护理保健器具，非医疗器械，不可替代药物或手术治疗。
如有健康问题，请咨询专业医师并前往正规医疗机构就诊。

重要提示

使用须知

Important Notice

首次使用前，请完整阅读本说明书
并按照说明书规定的方法使用、清洁与存放本产品。

01

完整阅读

请在使用前了解产品结构、指示灯状态、操作方法、禁忌人群及安全注意事项，并妥善保存本说明书，以便日后查阅。

02

撕除保护贴

发货时，马蹄形电极头表面贴有保护贴。首次使用前，请将其完整撕除，再与电极贴接口接触。

03


禁止拆机

请勿自行拆解、改装或维修主机。未经涉漫® 授权拆机后，将不再享受保修及售后服务；如设备异常，请联系官方客服。

产品结构

认识产品

Product Structure

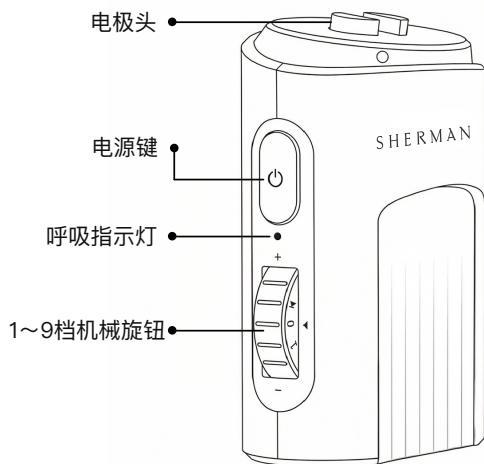

ORO主机

电极贴接口



专属电极贴

指示灯说明与包装清单

认识产品

Indicator Guide & Package Contents

操作与灯语指引

Indicator Guide



白灯常亮
0档待机



白灯闪烁
充电中



绿灯闪烁
1~9档训练



绿灯常亮
充电完成



黄灯常亮
电量不足

包装内含

01	ORO主机	×1	02	电极贴	×30
03	电源适配器	×1	04	Type-C充电线	×1
05	快速使用指南	×1	06	保修售后服务卡	×1
07	合格证	×1			

产品参数

Specifications

产品信息

ORO系列男性激能延时训练仪

型号	TH-001	刺激频率	1Hz~100Hz（可调）
脉冲宽度	50 μ s~400 μ s	训练档位	1~9档
单次训练	建议6分钟	主机重量	约80g
电源	3.7V可充电锂聚合物电池 (200mAh)	额定充电输入	DC 5V $\overline{\text{---}}$ 2A
续航	满电后约可完成10次训练	充电接口	Type-C
产品外形尺寸	57 $\times$ 37 $\times$ 86 mm（长 $\times$ 宽 $\times$ 高）	外壳材质	PC+ABS

输出与使用年限

最大输出电压 25 Vpp (1000 Ω) 负载	最大输出电流 <50 mA (500 Ω 负载, 有效值)	最大输出功率 125 mW	推荐使用年限 3年
--------------------------------------	---	------------------	--------------

使用与储存环境

+5 $^{\circ}$ C~+40 $^{\circ}$ C 环境温度	15%~90%RH 相对湿度	700hPa~1060hPa 大气压力
--	-------------------	------------------------

首次使用前

安全使用

Before First Use

01

检查包装

确认包装内物品齐全，主机与配件外观无破损。

02

完成充电

使用配套适配器与Type-C充电线充电。
白灯闪烁表示充电中，绿灯常亮表示充电完成。

03

撕除保护贴

首次使用前，请完整撕除电极头表面的保护贴；
请勿在未撕除保护贴的情况下使用本产品。

04

清洁皮肤

确保使用区域皮肤清洁、干燥，无明显油脂或毛发，且无破损、感染。

05

准备电极贴

每次训练使用一片新的电极贴，确认电极贴完整后再使用。

使用方法 1-3


操作方法

How to Use




1 贴上电极贴

确保皮肤清洁、干燥后，在男性私处中段位置贴上电极贴。

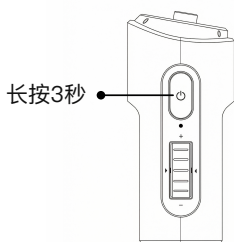

2 开启ORO主机

长按侧面电源键3秒，直至白色呼吸灯亮起，ORO主机进入待机状态。

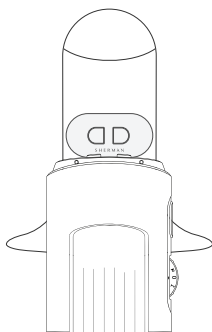


3 连接电极头

确认电极头上的保护贴已完全撕除。将ORO主机的Logo面朝向自己，再将电极头对准电极贴接口，轻触完成连接。

使用方法 4-6

操作方法

How to Use

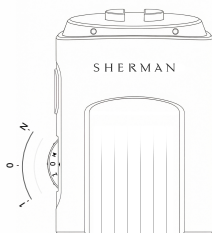

4 调节训练强度

旋转机械旋钮。建议从1档开始逐步调高，选择体感舒适的训练档位。



5 沉浸训练

保持平稳呼吸，确保ORO主机与电极贴保持轻触，避免错位或断开连接。

建议每次训练时长为6分钟。



6 训练结束

训练结束后ORO主机自动关机，并智能记忆当前档位，无需归“0”。

取下并妥善弃置一次性电极贴，清洁并妥善收纳ORO主机。

完成使用后，请按以下方式处理电极贴
并对主机进行清洁与收纳。

01

电极贴处理

电极贴为一次性用品，每次训练使用一片。训练结束后，请将其取下并妥善弃置，不得重复使用。

02

主机清洁

关机并断开充电后，用柔软干布擦拭主机。请勿水洗、浸泡或使用腐蚀性清洁剂。

03

妥善储存

将主机置于干燥、通风且儿童无法触及处，避免高温、潮湿及阳光直射；电极贴应存放于阴凉、干燥处，高温可能破坏其凝胶状态，影响使用效果。

04

电池维护

长期不使用时，请定期为主机充电，避免电池过度放电。再次使用前，请先检查设备状态。

使用后请及时清洁并妥善收纳，以保持主机及电极头清洁、干燥。

适用与禁忌

安全使用

Users & Contraindications

18+

适用于18岁及以上、无本说明书所列禁忌状况，并能够正确理解和操作本产品的男性用户。

禁忌人群

01

体内植有金属物或有源电子装置（如心脏起搏器、除颤器或神经刺激器）者

02

勃起功能障碍（ED）患者，包括勃起困难、无法维持勃起或性功能严重减退者。

03

外生殖器区域存在皮肤破损、溃疡、感染、水疱、开放性伤口或活动性皮肤病者。

04

对电刺激高度敏感，或既往使用电刺激产品时出现明显不适者。

05

患有癫痫、严重心律不齐或其他影响神经系统的重大疾病者。

安全注意事项

安全使用

Safety Precautions

使用环境与防水

- ① 请勿在浴室、淋浴间等潮湿场所使用本产品；
- ② 请勿在车内、高温、靠近火源或阳光直射处使用、充电或存放。
- ③ 请勿将主机浸入水中、直接冲洗或使液体进入充电接口。
- ④ 请勿在驾驶或操作机械等需要集中注意力的活动中使用。

设备与配件

- ① 每次使用前，请确认主机、电极头、电极贴及充电配件外观完好。
- ② 请勿摔落、撞击、挤压、刺穿或焚烧主机及其配件。
- ③ 充电过程中，请勿使用本产品。

使用过程中

- ① 出现异常发热、异响、无法充电、外壳破损或功能异常，请立即停止使用。
- ② 使用其他向身体传输电脉冲的设备时，请勿同时使用本产品，并避免在强电磁场环境中使用。
- ③ 使用部位可能出现短暂、轻微泛红；如出现持续性红肿、瘙痒、疼痛、麻木或其他明显不适，请停止使用。
- ④ 档位调整应始终以体感舒适为准，请勿以强烈刺激感作为训练标准。

合规与服务支持

产品信息

Compliance & Support



RoHS

执行标准（部分）

GB 4343.1-2024; GB 17625.1-2022; GB/T 4706.1-2024; EMC 2014/30/EU; LVD2014/35/EU; 2011/65/EU&2015/863/EU; 47 CFR FCC Part15 Subpart B ANSI C63.4:2014等。

生产方与联系信息

制造商

上海巨钐医疗科技有限公司

地址

上海市虹口区中山北二路1515号E段三层304E室

售后客服电话

130 6186 6386

售后客服微信

ShermanMedical

电子邮件

official@sherman.love

官方网站

www.sherman.love



PICC
中国人民保险

本产品由中国人民保险公司承保



扫码联系在线客服
售后咨询 · 使用指导



搜索：Sherman 涉漫

